

NEREZOVÁ TELÍCÍ TYČ – PORODNÍ PÁKA PRO BEZPEČNÝ POROD TELAT KERBL 1046 VINK

SNADNÁ OVLADATELNOST


Telící tyč se umístí přes záď krávy, otevřenou stranou směrem k páteři. Zařízení se samo opře o záď krávy a drží na místě. To umožňuje mít obě ruce volné, abyste mohli pomoci krávě i teleti.

Poté se provázky nejprve připevní k oběma nohám telete a následně k pákovému mechanismu. Nyní stačí provázky jemně napnout a telící tyč zaujme správnou polohu (ať už kráva stojí nebo leží).




PŘI PŘEDNÍ POLOZE PLODU (hlavou napřed)

Je potřeba táhnout směrem dolů k vemeni, dokud se neobjeví hlava, a poté v horizontální poloze. Pokud hrozí, že se pánev telete zasekne v pánvi krávy, je třeba zatáhnout více ve směru k vemeni.

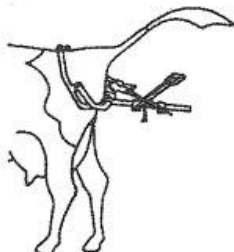

PŘI ZADNÍ POLOZE PLODU (zadními končetinami napřed)

Tah se vede směrem k ocasu, dokud se neobjeví zadní končetiny telete, a poté se přejde do horizontální polohy.

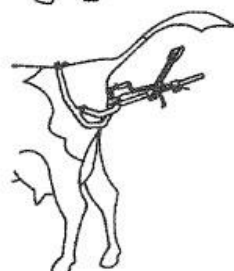


RYCHLOUPÍNAČÍ MECHANISMUS

Stiskněte západku C a stejnou rukou zatlačte celý mechanismus páky směrem ke krávě. Rukojeť se pohne dopředu a automaticky uvolní západku D.

Netlačte rukojeť směrem dozadu.

Pokud jsou lana příliš napnutá, posuňte rukojeť mírně dozadu, aby se západka C uvolnila snadněji.

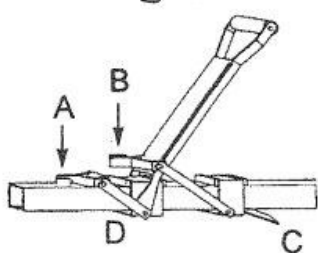

Pákový mechanismus telící tyče VINK s alternativním tahem je vybaven 2 háky, které se při zatažení rukojeti směrem dozadu postupně vysouvají. Vzdálenost mezi oběma háky při tažení dozadu je přibližně 7 cm. Vzdálenost mezi uzly na lanech musí být stejná, aby byl zajištěn rovnoměrný tah na obě nohy telete.

Příklad:

Červené lano na předním háčku (A):	uzly na 30 a 43 cm
Modré lano na zadním háčku (B):	uzly na 37 a 50 cm

VAROVÁNÍ:

Pokud kráva během porodu stojí, může se náhle položit, v takovém případě se může tyč vychýlit do strany.

Poznámka:

Telecí tyč VINK je dodávána se standardním pákovým mechanismem a bílými lany. Vzdálenost mezi uzly si můžete určit sami. Uzly na obou lanech musí být ve stejné vzdálenosti, aby byl zajištěn rovnoměrný tah na obě nohy telete.